
Air-cow

Mode d'emploi

PREPARATIFS:

- Vérifier la nature et l'inclinaison du sol (pailler au besoin), l'idéal étant un sol plat et sans aspérité
- Entraver les postérieurs
- Protéger les pieds à l'aide de bandes adhésives, scotch...
- Tranquilliser ou sédaté l'animal au besoin
- Placer l'animal en décubitus latéral abandonné

MISE EN PLACE:

Méthode 1

- Etaler le coussin dégonflé face à l'animal couché en respectant la position de la bavette à l'avant.
- Vérifier que les 6 petites sangles latérales soient attachées
- Amener le coussin dégonflé sous l'animal couché
- Placer les antérieurs dans le trou rectangulaire
- Placer les postérieurs dans le trou en losange
- Bien enfoncer le coussin sous l'animal, en le tournant un peu sur le dos si besoin
- **Replacer l'animal en décubitus sternal**

Méthode 2

- Gonfler le coussin
- Lever l'animal via dispositif de levage classique (pince de hanche, harnais,...)
- Glisser le coussin sous l'animal ou déposer l'animal dans le coussin puis l'attacher avec la sangle thoracique et la bavette
- Retirer le dispositif de levage classique

GONFLAGE:

- Gonfler le coussin en prenant soin de vérifier la fermeture de la seconde valve
- Maintenir l'animal en sternal
- Pousser de temps en temps sur le train arrière de l'animal pour permettre une bonne circulation de l'air
- Une fois le coussin gonflé, fermer la valve
- Si l'animal se tient debout seul à cette étape, passer au RETRAIT DU COUSSIN sinon:
- Placer la sangle centrale au dessus du garrot et la fermer
- Si vous le souhaitez, attacher aussi la bavette autour de l'encolure
- **Stabiliser le coussin à l'aide de ballots ou de sangles fixées aux poignées latérales**

RETRAIT DU COUSSIN:

- Enlever les 6 petites sangles latérales
- Au besoin, dégonfler légèrement le coussin
- Dégager l'animal en tirant le coussin coté opposé aux ouvertures

RANGEMENT:

- Nettoyer et sécher correctement le coussin gonflé et fermé à l'aide des 6 petites sangles latérales
- Dégonfler le coussin au maximum en terminant à l'aide du compresseur mais dans ce cas, en fermant la seconde valve
- Replier le coussin en 2 dans le sens de la longueur
- Rouler ensuite la toile puis placer dans son sac
- Conserver le matériel au sec et propre permet de lui assurer une grande longévité

REMARQUES:

- Ne pas laisser l'animal dans le coussin si celui-ci montre des signes d'inconfort ou d'agitation
- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour laver le coussin